

米萌

米萌智能 姿态监测矫正器



扫描二维码下载手机应用



北京米萌智能科技有限公司

网址: <http://www.mimeng.cc>

邮箱: service@mimeng.cc

微信公众号: 米萌智能服务号

QQ: 3131978870

电话: 010-59480890

为达到最佳使用状态, 使用本产品前请仔细阅读使用说明

保修政策

- 15天内, 商品未使用且不影响二次销售, 包退。
- 商品质保1年, 1年内如有质量问题, 保修。
- 以下问题且不限于: 恶意破坏, 蓄意仿造, 人为进水等, 不属于质保范围。

产品包装

米萌智能姿态监测矫正仪1个



充电线1根




产品说明书1本



产品介绍

米萌智能姿态监测矫正器，是一款面向学生和白领的智能硬件，帮助用户实时监测姿态，提醒坐直站直。矫正器仅重35克，可以很轻很方便的佩戴于用户脖颈处。当用户姿态佝偻不直时，一旦超过其设置的阈值，就会自动震动报警，提醒用户及时恢复挺直。长期坚持，会帮助用户养成良好习惯，不驼背，不近视。

产品示意图

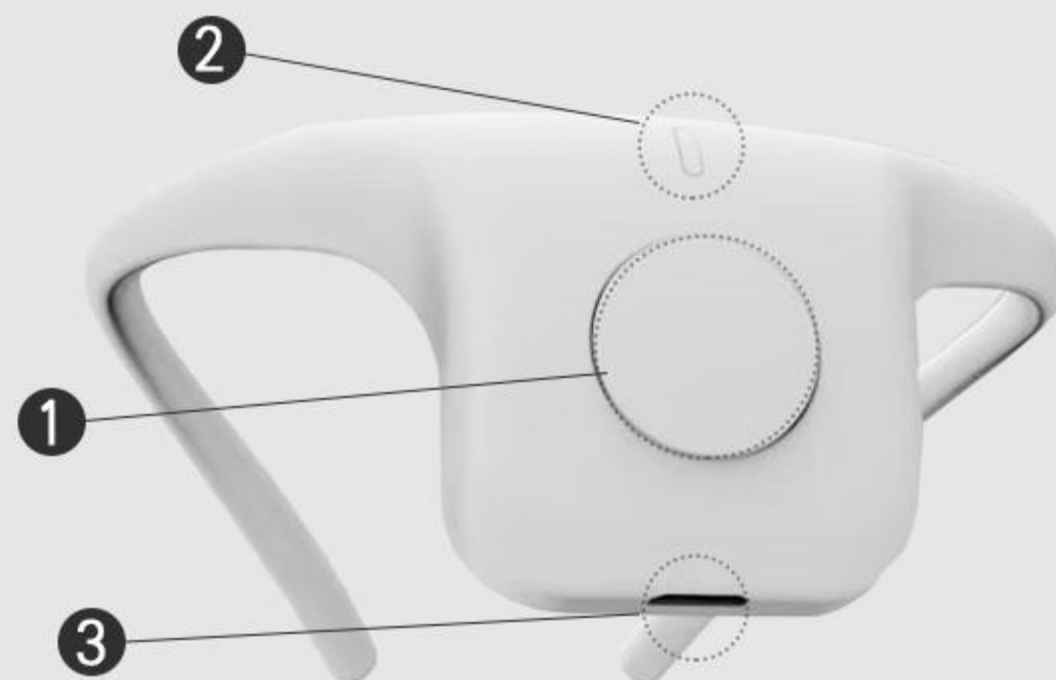

- 1 按键开关**
长按-开关机
短按-开机后，短按切换工作模式
- 2 状态指示灯**
蓝灯-工作状态指示灯
红灯-充电中指示灯
绿灯-充电完成指示灯
- 3 充电口**

使用说明

● 开关机

按键长按3秒开关机，开机后会有蓝灯闪烁。

● 两种工作模式

开机后，会有两种工作模式，按键短按切换模式。

训练模式，此模式下蓝灯闪烁。此模式下，需要连接小程序或者APP，按其设置训练时间，查看训练结果，定制训练计划等，可以有效直观的看到姿态保持训练效果。同时，此模式下，也可以通过软件设置报警倾斜阈值，延时报警等参数。

自由模式，此模式下蓝灯常亮。此模式下，一旦倾角超过阈值，就会震动报警。简单直接。

仅在训练模式下，小程序才可以通过蓝牙连接设备。其他情况例如关机，自由模式等，蓝牙都搜索连接不到设备。

● 充电

红色指示灯长亮：充电中

绿色指示灯长亮：充电完成

产品规格

型号：MIM10

重量：约35克

蓝牙芯片：BLE低功耗蓝牙4.2芯片

电池参数：锂电池3.7V，280mAh

支持机型：iPhone4S以后机型，Android绝大部分机型

支持系统：iOS9.0以上，Android8.0以上